



Test na ojcostwo ze szczoteczki do zębów, włosów, maszynki do golenia oraz innych mikrośladów

Ustalenie ojcostwa odbywa się poprzez analizę i porównanie materiału genetycznego należącego do konkretnych osób. Materiał genetyczny może pochodzić z różnych próbek – z wymazów z policzka lub mikrośladów.

Czym są mikroślady?

Są to **przedmioty, które mogą zawierać DNA konkretnej osoby**. Każdego dnia używamy wielu różnych przedmiotów, pozostawiając na nich swój ślad w postaci nieznaczej ilości materiału genetycznego. Robimy to np. myjąc zęby, żując gumę czy paląc papierosa. Takich przedmiotów, z których można „wydobyć” czyjeś DNA jest bardzo dużo, w laboratoriach genetycznych wszystkie je nazywa się mikrośladami. Są to np. **szczoteczki do zębów, chusteczki z katarem, niedopałki papierosa, włosy z cebulkami i wiele innych**.




Pewność wyniku testu na ojcostwo z mikrośladów

Wynik testu na ojcostwo z nietypowych próbek jest tak samo pewny jak ten, w którym wykorzystane zostały wymazy policzkowe. Analizując taki materiał **można jednoznacznie potwierdzić lub wykluczyć biologiczne ojcostwo**.

Co trzeba zrobić, aby zlecić test na ojcostwo z mikrośladów?

- Zadzwonić, napisać e-maila lub skontaktować się z nami na czacie
- Zebrać, zabezpieczyć i wysłać próbki do laboratorium
- Czekać na rezultat wykonanej analizy

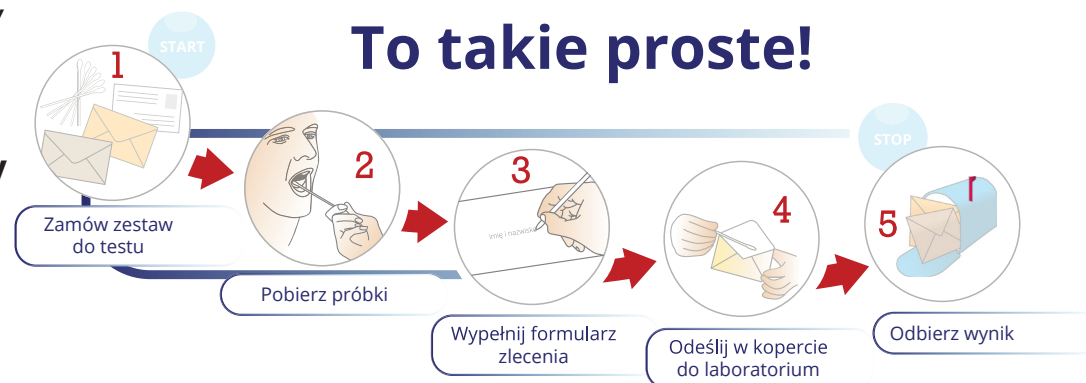

Mikroślady można również przynieść do przychodni i na miejscu pobrać od siebie wymaz z policzka.

Próbki mikrośladowe **można przesłać do nas nawet z zagranicy** - dobrze zabezpieczone materiały nie ulegną zniszczeniu nawet podczas kilkudniowego transportu.

Próbki mikrośladowe, które są badane najczęściej

→ WŁOSY

- Tylko te wyrwane z cebulkami – nie można ich ściąć nożyczkami lub zebrać ze szczotki
- Najlepiej w ilości co najmniej 5 sztuk



→ SZCZOTECZKA DO ZĘBÓW

- Nie może to być szczoteczka zbyt nowa – musi mieć ślady używania
- Trzeba mieć pewność, że myła nią zęby tylko jedna osoba


→ MASZYNKA DO GOLENIA

- Nie może to być maszynka zbyt nowa – musi mieć widoczną szczecinę
- Trzeba mieć pewność, że goliła się nią tylko jedna osoba



→ ŚLADY KRWI

- Zachowane na różnych materiałach – odzieży, podpasce, tamponie, plastrze

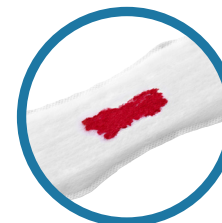

→ PATYCZKI KOSMETYCZNE DO CZYSZCZENIA USZU

- Z woskowiną uszną na patyczku



→ PASEK Z GLUKOMETRU

- Zabezpieczony w czystej kopercie, ewentualnie pojemniku na mocz

→ CHUSTECZKA DO NOSA

- Ze znajdującym się w niej katarzem
- Nie może być nasączona substancjami zapachowymi
- Nie może mieć śladów makijażu/ resztek jedzenia

**→ MAJTKI (bielizna osobista)**

- Nie prana
- Z wydzieliną z pochwy lub śladami spermy

**→ GUMA DO ŻUCIA**

- Żuta nie krócej niż 10 min.

**→ PAZNOKCIE**

- Należy je wyciąć wraz ze skórkami

**→ WIDELCE, NOŻE /NACZYNIA/ PUSZKI PO NAPOJACH**

- Może nimi jeść lub pić z nich tylko jedna osoba
- Nie mogą być myte ani płukane

**→ FILTR Z PAPIEROSA**

- Palony wyłącznie przez jedną osobę
- Zabezpieczony w czystej kopercie, bądź pojemniczku na mocz

**→ SMOCZEK LUB GRYZAK DZIECIĘCY**

- Nie gotowany/ nie dezynfekowany
- Odpowiednio zabezpieczony do transportu – tak aby nie miał kontaktu z żadnym przypadkowym podłożem





Pacjenci LabGen są objęci **bezpłatnym ubezpieczeniem próbek**.
Jeśli analiza pierwszej próbki nie pozwoli na wystawienie wyniku,
wówczas badanie drugiej próbki jest bezpłatne.

Dysponują Państwo innymi próbkami? Prosimy o kontakt!



Telefon: (85) 871 08 80
Czynny codziennie od 8.00 do 24.00
oraz w weekendy i święta od 8.00 do 21.00

Jeśli posiadają Państwo jakiś przedmiot należący do uczestnika badania, ale nie mają pewności czy mógłby on zostać wykorzystany w analizie, prosimy o kontakt. Nasi specjaliści powiedzą Państwu czy przedmiot ten stanowi wartościową próbkę, czy może do badania trzeba będzie włączyć coś innego. Doradzimy także jak zebrać i jak zabezpieczyć próbki.

Jak zapakować próbki do wysyłki?

Przed przystąpieniem do zbierania mikrośladów najlepiej ubrać **rękawiczki ochronne**, które zapobiegają przed ich zabrudzeniem. Prosimy również zachować ostrożność

i nie dotykać dłońmi (bez rękawiczek) tych miejsc, w których potencjalnie może znajdować się DNA osoby uczestniczącej w badaniu.

Jeżeli próbka mikrośladowa jest mokra (np. plama krwi), trzeba ją najpierw dokładnie osuszyć. Wszystkie próbki niestandardowe najlepiej trzymać **w suchym pomieszczeniu bez dostępu do zbyt dużej ilości światła**. Mikroślady najlepiej umieścić w **czystej, suchej kopercie**. Następnie należy je odesłać pocztą do laboratorium wraz z wypełnionym formularzem zlecenia lub zadzwonić do nas po bezpłatnego kuriera. Mikroślady można też przynieść do przychodni.

Jeżeli próbki, które dotrą do laboratorium będą złej jakości (np. będą zapleśniałe), wówczas zwrócimy się z prośbą o ponowne pobranie próbek.



Pytania najczęściej zadawane przez naszych Pacjentów

1) Czy wynik testu na ojcostwo z mikrośladów jest tak samo pewny jak z wymazów?

Oczywiście! Wynik testu na ojcostwo jest pewny, niezależnie od rodzaju analizowanego materiału. Ojcostwo zawsze zostaje jednoznacznie potwierdzone lub wykluczone.

2) A co jeśli dostarczone mikroślady nie będą użyteczne w badaniu?

Jeśli w toku analizy okaże się, że próbka mikrośladowa będzie zanieczyszczona obcym DNA, lub jego ilość będzie niewystarczająca, to zostaną Państwo niezwłocznie o tym powiadomieni i poproszeni o dostarczenie innych materiałów.

Natomiast jeśli analiza pierwszej próbki nie pozwoli na wystawienie wyniku, wówczas badanie drugiej próbki jest dla pacjentów LabGen jest bezpłatne.

3) Dlaczego cena za test na ojcostwo z mikrośladów różni się od ceny badania wymazów z policzka?

Próbki mikrośladowe wymagają zastosowania lepszych odczynników i bardziej czułych metod niż wymazy z policzka. Generuje większe koszty i automatycznie podwyższa cenę badania.

4) Jaki jest czas oczekiwania na wynik badania ojcostwa z mikrośladów?


Wynik testu na ustalenie ojcostwa z wykorzystaniem mikrośladów jest gotowy do odbioru po 5-10 dniach roboczych.



Mają Państwo więcej pytań odnośnie testów na ojcostwo z mikrośladów?

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego, mailowego lub rozmowy na anonimowym czacie.

Jesteśmy dostępni w tygodniu od 8.00 do 24.00 oraz w weekendy i święta od 8.00 do 21.00

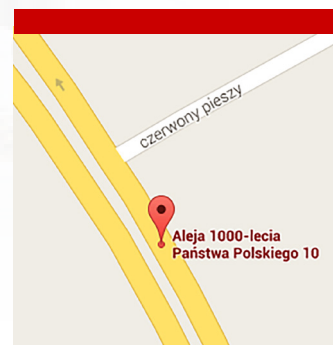

Główny Punk Pobrań LabGen
REVITA-LAB, Medyczne
Laboratorium Diagnostyczne
ul.1000-lecia Państwa Polskiego 10/21
15-869 Białystok

☎ Telefon:(85) 871 08 80, 570 423 011

✉ E-mail: **biuro@laboratoriumgenetyczne.pl**

💬 Czat na stronie internetowej
laboratoriumgenetyczne.pl

Powyższy poradnik został napisany przez: **Podlaskie Centrum Genetyki LabGen**

Więcej informacji znajdą Państwo na stronach naszego serwisu:
laboratoriumgenetyczne.pl